

Vejledning om udtagning af svælgsvaberprøver for SARS-CoV-2 hos mink

Indhold

Indledning.....	1
Prøvetype og udstyr	2
Bestilling af materialer	3
Udtagning af svælgsvaberprøver.....	3
Kontakt laboratoriet	3
Udvælgelse af dyr der skal udtages fra	4
Prøver der skal tages ved den kvartalsvise overvågning.....	4
Prøver der skal tages maksimalt 10 dage før pelsning.....	4
Prøver der skal tages ved indførsel af mink fra et andet land.....	4
Udtagning af prøverne	4
Mærkning af prøverørene	5
Udfyldelse af rekvisitionsblanketten	5
Blanketten til SSI – bilag 1 a:	6
Blanketten til DTU – bilag 1 b:	6
Pakning og afsendelse af prøverne	6
Du modtager analysesvar fra laboratoriet	6
Bilag 1a	8
Bilag 1b	10
Bilag 2	11
Bilag 3	13
Bilag 4	14
Bilag 5	15
Bilag 6	16

Indledning

Overvågning af COVID-19 i mink og andre pelsdyr er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1158 af 11. september 2023 om COVID-19 i pelsdyr. Der skal udtages svælgsvaberprøver i tre situationer:

- *Hver tredje måned: Svælgsvaberprøver fra fem pelsdyr, som er selvdøde eller aflivet som følge af sygdom inden for de seneste tre måneder. Er der mindre end fem pelsdyr, der er døde i perioden, skal der blot tages prøver af det antal, der er døde i perioden.*
- *Maksimalt 10 dage før pelsning: Svælgsvaberprøver fra 15 pelsdyr forud for aflivning med henblik på pelsning, således at det sikres, at prøvesvaret er modtaget inden kroppene flyttes til pelseri. Der er muligt at tage prøverne i forbindelse med at pelsdyrene aflives, men det skal stadig sikres, at prøvesvaret er modtaget, inden der flyttes kroppe til pelseriet.*
- *Ved indkøb af pelsdyr i udlandet: Svælgsvaberprøver fra 60 mink ved indførsel til Danmark.*

Kravene ses af § 3, stk. 1 og 2 samt § 16, stk. 1.

Periode*	Prøver der skal udtages
1/1 til 31/3	5 svælgsvaberprøver af mink, som er døde i perioden – sendes i samme rør
1/4 til 30/6	5 svælgsvaberprøver af mink, som er døde i perioden – sendes i samme rør
1/7 til 30/9	5 svælgsvaberprøver af mink, som er døde i perioden – sendes i samme rør
1/10 til 31/12	15 svælgsvaberprøver fra levende mink tidligst 10 dage før pelsning – prøverne kan samles 5 stk. pr. rør, og 5 svælgsvaberprøver af mink, som er døde i perioden – sendes i samme rør
Ved alle indførsler af mink fra andre lande	60 svælgsvaberprøver fra levende mink i forbindelse med ankomsten af minkene til besætningen – prøverne kan samles 5 stk. pr. rør.

*Perioderne behøver ikke at følge kvartalerne, men kan forskydes. Det er kun et krav, at periodernes længde ikke længere end 3 måneder.

Prøver der udtages ved indførsel bør tages på dagen for ankomst og senest inden for nogle få dage efter ankomst.

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til minkavlere ved udtagelse af prøver fra både døde og levende mink.

Statens Serum Institut (SSI) og DTU, Center for Diagnostik (DTU) er akkrediterede og udpeget til at udføre COVID-19 analyser. Vejledningen beskriver derfor indsendelse af prøver til både SSI og DTU.

Du kan som avler frit vælge, hvilket et af disse to laboratorier, du ønsker at benytte.

Prøvetype og udstyr

Prøvetype:

Den type af prøver, du skal udtage, er svælgsvaberprøver uden medie.

Prøveudstyr:

Du skal bruge følgende materialer:

- Sterile vatpinde med lille hoved og træskaft eller stålskaft (husk skævbider, hvis der anvendes vatpind med stålskaft):



- Sterile spidsglas eller tilsvarende rør med skruelåg som er store nok til at indeholde fem vatpinde (fx 50 ml Falcon rør eller centrifugerør med skruelåg).



Det er vigtigt, at det er sterile vatpinde for at undgå, at materialet bliver forurenset og dermed giver anledning til forkerte testresultater.

- Tusch eller pen som kan skrive på plast, og som er vandfast (kan købes hos de fleste boghandlere).
- Pakkemateriale (plastposer og forede kuverter/boblekuvert eller tilsvarende pakkemateriale) og labels – se beskrivelse på Statens Serum Instituts hjemmeside: <https://www.vetssi.dk/rekvirer-analyser/emballering>. (Prøverørene er den primære emballage). Pakkelabels til DTU og til SSI findes i bilag 3 eller 4.
- Rekvisitionsblanket som skal udfyldes og sendes med prøverne. Et eksempel kan ses i bilag 1. Blanketterne til DTU og SSI findes i bilag 5 og 6.

Bestilling af materialer

Du skal selv bestille og betale for det materiale, der skal anvendes til at udtage prøverne.

Sterile vatpinde og sterile prøverør kan bestilles hos de fleste leverandører¹ af medicinsk udstyr og laboratorieudstyr.

Udtagning af svælgsvaberprøver

Kontakt laboratoriet

Laboratorier vil gerne kunne planlægge deres arbejde for at kunne yde den bedste betjening. Det er derfor en god idé at ringe til laboratoriet og aftale nærmere om tidsplan og praktiske detaljer som f.eks. afsendelsesdag, svarfrist, pris mv.

Fortæl laboratoriet om selve prøveindsendelsen på mail.

¹ Leverandøreksempler: Hounisen, Scandidact, Zenitech, Apopro, Lomax A/S, Rajapack.

Laboratoriernes kontaktoplysninger er:

- Statens Serum Institut findes oplysningerne her:
E-mail: vetdiagnostik@ssi.dk og telefonnummer: 3268 8600
- DTU, Center for Diagnostik:
E-mail: ival@dtu.dk og telefonnummer: 9351 0763

Udvælgelse af dyr der skal udtages fra

Prøver der skal tages ved den kvartalsvise overvågning

Hver tredje måned skal du udtages og indsende prøver fra 5 pelsdyr der er døde eller aflivede som følge af sygdom indenfor de seneste 3 måneder.

Er der ikke død 5 pelsdyr i perioden, skal du blot udtage prøver af det antal, der er til rådighed.

Det vil være nødvendigt at optø dyrene delvist for at kunne åbne munden og tage prøven i svælget.

Prøver der skal tages maksimalt 10 dage før pelsning

Indenfor de sidste 10 dage før pelsning skal du tage svælgsvaberprøver af 15 af de mink der skal pelses. Prøvesvaret skal foreligge før minkene sendes til pelsriet.

Du kan selv vælge om du vil tage prøverne fra de levende mink inden aflivning eller om du vil tage prøverne af mink i forbindelse med at de aflives til pelsning. Det vigtigste er blot at kroppene ikke flyttes til pelsriet inden resultatet af prøverne foreligger.

Findes der COVID-19 i prøverne skal du kontakte Fødevarestyrelsen og minkene må ikke sendes til pelsning umiddelbart.

Disse prøver kan ikke træde i stedet for kvartalsprøverne. Kvartalsprøverne giver et billede af om der har været virus til stede i de seneste tre måneder, mens disse prøver kun giver et øjebliksbillede af om besætningen er fri for COVID-19 forud for at pelsningen begynder.

Prøver der skal tages ved indførsel af mink fra et andet land

Du skal udvælge 60 mink fra hver forsendelse, der ankommer til din besætning fra et andet land.

For at få et så dækkende resultat som muligt, er det en god idé at vælge mink jævnt fordelt i forsendelsen.

Med en forsendelse menes en gruppe af mink fra en bestemt afsender eller oprindelse som ankommer eller sendes samlet. Hvis du f.eks. får mink fra en afsender i Spanien og en afsender i Finland, skal du tage 60 prøver fra hver gruppe – i alt 120 prøver.

Udtagning af prøverne

Prøverne der udtages i de tre situationer som beskrevet ovenfor samles med 5 vatpinde per prøverør. Det vil sige, at du ikke skal sende 5, 15 eller 60 enkelte prøverør til undersøgelse men kun 1, 3 eller 12 rør med hver 5 vatpinde.

I bilag 2 finder du billeder af, hvordan prøven skal tages og billeder af, hvordan minken kan holdes ved prøvetagningen på henholdsvis døde og levende mink. Bemærk hvor langt vatpinden skal ind – svælget er aller bagest i mundhulen ved overgangen til halsen. Brug handsker, når du udtager prøver, og vær opmærksom på, at den sterile vatpind ikke må berøre andet end svælget på den mink, der tages prøver af.

Det er vigtigt, at prøven tages fra svælget på minken, da det er her virus forventes at være tilstede i størst omfang (se bilag 2).

Ved prøvetagning på levende mink vil det være nødvendigt at være to personer om opgaven – én til at holde minken og én til at udtage prøven.

Der er forskellige måder at fastholde en mink på i forbindelse med prøvetagningen. Du må vælge den måde, der passer jer bedst, og som samtidig giver mulighed for at tage prøverne på den mest skånsomme vis for både personale og mink.

En mulighed er at anvende en handske eller en sorteringsfælde til at holde minken. Minken præsenteres for en "bidepind". Det kan f.eks. være en rundstok med en størrelse, der gør det muligt at føre vatpinden ind ved mundvigen og ned i svælget til prøvetagning, eller en pind med hul i, der gør det muligt at føre vatpinden gennem hullet og ned i svælget til prøvetagning.

Bedøvelse af mink i forbindelse med prøvetagning kan blive nødvendig, men bør være den absolut sidste udvej. Bedøvelse af mink skal foretages af en dyrlæge. Her kan du kontakte din praktiserende dyrlæge for at høre nærmere.

Mærkning af prøverørene

Hvert prøverør mærkes, så laboratoriet kan se, at de kommer fra din besætning, også selv om de ikke lige har indsendelsessedlen liggende ved siden af. Det gøres bedst ved at bruge din besætnings CHR-nummer og et fortløbende tal eller bogstav (f.eks. 12345-1, 12345-2 osv. eller 12345-A, 12345-B osv.).

Du kan med fordel mærke prøverørene, inden du begynder at tage prøverne.

Den samme mærkning skal skrives i feltet om prøveoplysninger i rekvisitionsblanketten. Her kan du samtidig oplyse, hvilke 5 mink prøverne i de enkelte rør stammer fra.

Hvis det er levende mink f.eks. ved at oplyse hal eller rækkenummer (se eksempel i bilag 1). På den måde vil det være muligt at finde tilbage til det afsnit i besætningen/forsendelsen en samlet prøve stammer fra, hvis det bliver nødvendigt at tage flere prøver. Det kan f.eks. være, hvis en af prøverne viser fund af COVID-19. Hvis det er kvartalsprøver fra døde mink kan dødsdatoen anvendes.

Udfyldelse af rekvisitionsblanketten

Forskellige laboratorier anvender forskellige blanketter. Det er de samme oplysninger, der skal gives til laboratoriet, og du skal bruge den blanket, der passer til det laboratorium, du vil sende prøverne til.

Rekvisitionsblanketten hos Statens Serum Institut og DTU findes i bilag 5 og 6.

I bilag 1a og 1b er vedlagt et eksempel med nogle af felterne for-udfyldt som eksempel.

Du skal udfylde så mange af felterne som muligt. Det vil hjælpe laboratoriets personale i det arbejde, de skal udføre med at registrere prøverne.

Mange af felterne kan for-udfyldes og gemmes på egen PC eller skrives ud i flere eksemplarer, så du ikke skal skrive det hele hver gang. Det er f. eks. ejernavn, adresse, CHR nummer, telefonnummer og e-mailadresse.

Der er enkelte felter i de to blanketter, som skal udfyldes på en særlig måde, de er markeret og udfyldt i eksemplet i bilag 1a og 1b:

Blanketten til SSI – bilag 1 a:

Øverst skal du afkrydse i feltet "Prøvemateriale indsendes til....."

Rubrikken "Materiale" – her afkrydses i "Andet" og angives "Svælgsvaber"

Rubrikken "Undersøgelses anledning og andre bemærkninger" – her afkrydses i feltet "Overvågning" når det drejer sig om kvartalsprøverne. Der afkrydses i feltet "Andet", når det drejer sig om prøver, der tages før pelsning eller ved indførsel af mink fra et andet land. Her skal du også skrive om det er "pelsning" eller "indførsel".

Rubrikken "Analyser" – her afkrydses i "SARS-CoV-2 PCR (9314, 9408)"

Husk at underskrive blanketten.

Blanketten til DTU – bilag 1 b:

Blanketten er lavet særligt til jer. Derfor er der afkrydsningsfelter for hver af de tre grunde til at indsende svælgsvaberprøver.

I rubrikken "indsendelsesårsag" skal du derfor blot afkrydse det felt der svarer til prøverne.

Pakning og afsendelse af prøverne

Du kan finde en udførlig beskrivelse af hvordan prøverørene skal pakkes på Statens Serum Instituts hjemmeside her: <https://www.vetssi.dk/rekvirer-analyser/emballering>

Prøver til DTU skal pakkes på samme måde.

Følg punkterne. Den primære beholder er det prøverør, du har lagt vatpindene ned i.

Da prøverne ikke indeholder væske, er det ikke nødvendigt med sugende materiale. Den plastpose, som du har lagt prøverørene i, fungerer som sekundær beholder. Bind godt for denne pose.

Posen med prøverørene lægges sammen med den udfyldte rekvisitionsblanket i en foret kuvert /boblekuvert eller kasse.

Kuverten/kassen forsynes med den særlige pakkelabel til Statens Serum Institut eller til DTU, Center for Diagnostik, som findes i bilag 3 og 4.

Pakkelabel har den rigtige adresse på. Husk at afkrydse i rubrikken: "Virologi (øvrige virus)" i pakkelabel til SSI.

Prøverne er nu klar til at blive sendt.

Der må ikke gå mere end 72 timer fra prøverne er taget til laboratoriet modtager dem. Pakken/kuverten skal derfor sendes som kvikpost eller med kurer/pakkeservice, så den kan nå frem.

Du modtager analysesvar fra laboratoriet

Laboratoriet vil sende svaret på analysen af dine prøver direkte på e-mail til dig. Husk derfor at skrive din e-mailadresse på rekvisitionsblanketten.

Du skal gemme analysesvaret uanset resultatet – Fødevarestyrelsens kontrolpersonale kan bede om at se svaret, når de kommer på besøg.

COVID-19 er en anmeldepligtig sygdom. Det vil sige, at du har pligt til at fortælle din dyrlæge, hvis laboratoriet finder SARS-CoV-2 virus i prøverne. Din dyrlæge skal derefter kontakte Fødevarestyrelsen. Laboratoriet vil ofte også give besked til Fødevarestyrelsen ved fund.

Bilag 1a



Læs hvordan SSI behandler personoplysninger her [Persondatapolitik](#), under "Hvis SSI analyserer en prøve fra din besætning".

Rekvizitionsblanketten udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver. Blanketten kan hentes her: www.vetssi.dk/blanket

Prøvemateriale indsendes til (tlf. 3268 8600): Veterinær Diagnostik, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, Att.: PDC, bygn. 85
 Kadavere og hele organer indsendes til: Sektion for Patobiologi, Sektionsstuen, Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Ridebanevej 3, 1870 Frederiksberg C, tlf. 9350 9280 mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.00-15.00

Indsender (stempel):	Svar sendes til e-mail adresse(r):
	Mobiltelefon:
	Praksisnr.:
	Autorisationsnummer:

Besætningsadresse:	CHR-nr.:	Ejer:
	Besætningstype /status:	Antal dyr:
	Udtagelsesdato:	Materiale: <input type="checkbox"/> Kadaver/organer (sendes til KU) <input type="checkbox"/> Blod <input type="checkbox"/> Fæces <input type="checkbox"/> Væv type:.....
	Dyreart: MINK	<input type="checkbox"/> Serum <input checked="" type="checkbox"/> Andet: SVÆLSVÅBER

Undersøgelses anledning og andre bemærkninger:

Mistanke om anmeldepligtig sygdom FVST er underrettet om indsendelse Overvågning Specificeret diagnostik Eksport

Andet: **INDFØRSEL / PÆLSNING**

Kliniske oplysninger: Abort Diarré Hudlidelse Luftvejslidelse CNS-symptomer Dødsfald Ledlidelse Reproduktionsproblemer

Andet:.....

Analyser	Prøvenr.:	Analyser	Prøvenr.:
<input type="checkbox"/> Abekopper (monkeypox) PCR (9388)		<input type="checkbox"/> Mykobakterier standardundersøgelse mikroskopi og dyrkning (9100)	
<input type="checkbox"/> Afrikansk hestepest antistof (9167)		<input type="checkbox"/> Rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV, VHDV) PCR (9079)	
<input type="checkbox"/> Afrikansk hestepest PCR (9129)		<input type="checkbox"/> Rabies PCR (9163, 9164)	
<input type="checkbox"/> Aleutian mink disease virus (ADM) mink plasmacytosevirus PCR (9120)		<input type="checkbox"/> Salmonellose, Salmonella dyrkning (9080)	
<input type="checkbox"/> Bakteriologisk undersøgelse dyrkning (9377)		<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 antistof (9330)	
<input type="checkbox"/> Canine distemper virus (hvalpesyge, mink) PCR (9114)		<input checked="" type="checkbox"/> SARS-CoV-2 PCR (9314, 9408)	
<input type="checkbox"/> Ebola (EVD) PCR (9418)		<input type="checkbox"/> Snive (Burkholderia mallei) PCR (9247)	
<input type="checkbox"/> Ekinokokundersøgelse (9072)		<input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii antistof (9354)	
<input type="checkbox"/> Histopatologisk undersøgelse (9282)		<input type="checkbox"/> Trikinundersøgelse (9071)	
<input type="checkbox"/> Influenza A virus (IAV) PCR (9105)		<input type="checkbox"/> Tularæmi (harepest) dyrkning/PCR (9095)	
<input type="checkbox"/> Influenza A virus (IAV) subtypning, pandemisk Influenza A virus (H1pdm09) (9106)		<input type="checkbox"/> Usutuivirus (USUV) PCR (9155)	
<input type="checkbox"/> Influenza A virus (IAV) subtype sekvensanalyse (9103)		<input type="checkbox"/> Vesikulær stomatitis (VSV) antistof (9183)	
<input type="checkbox"/> Leptospira antistof (9040-9056) Angiv ønsket type:.....		<input type="checkbox"/> Vesikulær stomatitis (VSV) PCR (9148, 9149)	
<input type="checkbox"/> Leptospira PCR (9070)		<input type="checkbox"/> West Nile virus (WNV) antistof (9169)	
<input type="checkbox"/> Andet:		<input type="checkbox"/> West Nile virus (WNV) PCR (9154, 9156)	

Prøvenr. - se næste side

Dato: _____ Navn (blokbogstaver): _____

Underskrift (Jeg har læst og accepterer SSI's salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende for bestillingen): _____

Forbeholdt laboratoriet		
Modtaget dato:	Modtaget af:	Bemærkninger og sagsnummer:



ØVRIGE DYR

 KØBENHAVNS
UNIVERSITET

 STATENS
SERUM
INSTITUT


Prøveoplysninger

Nr.	Prøventr.:	Nr.	Prøventr.:	Nr.	Prøventr.:
1		31		61	
2	KAL 2	32		62	
3	RÆKKE 2	33	12345 - 1	63	
4		34		64	
5		35		65	
6		36		66	
7	KAL 1	37		67	
8	RÆKKE 6	38	12345 - B	68	
9		39		69	
10		40		70	
11		41		71	
12		42		72	
13		43		73	
14		44		74	
15		45		75	
16		46		76	
17		47		77	
18		48		78	
19		49		79	
20		50		80	
21		51		81	
22		52		82	
23		53		83	
24		54		84	
25		55		85	
26		56		86	
27		57		87	
28		58		88	
29		59		89	
30		60		90	

Denne blanket skal helst printes ud med for- og bagside på samme stykke papir.
Kan dette ikke lade sig gøre skal de to sider hæftes sammen.

Bilag 1b



Center for Diagnostik DTU

OBS: Mærk forsendelsen "Til forskning/diagnosticering"

Mink svaberprøver til test for SARS-CoV-2 ved PCR

Indsender:	Ejer:			
	CHR-nr.:			
	E-mail:			
	Mobil tlf.:			
Besætningsadresse:	Praksisnr.:		Dyreat:	Mink
	Autorisationsnr.:		Antal dyr:	
	Udtagelsesdato:		Alder:	-
	Besætningstype/status:		Materiale:	Svaber
Prøvemateriale afsendes fra:	<input checked="" type="checkbox"/> Besætningsadresse <input type="checkbox"/> Dyrlæge/praksis <input type="checkbox"/> Anden adresse:			
Indsendelsesårsag:	<input type="checkbox"/> Kvartalsvis overvågning <input checked="" type="checkbox"/> Føjepløvningsprøver <input type="checkbox"/> Indførselsprøver			
Mærke (ved flere end 20 prøver kan flere blanketter benyttes)				
1	HAL 2 RÆKKE 4 } 12345-A	11		
2		12		
3		13		
4		14		
5		15		
6	HAL 1 RÆKKE 5 } 12345-2	16		
7		17		
8		18		
9		19		
10		20		
Særlige bemærkninger:				
Navn (blokbogstaver) og underskrift: _____				
Laboratoriet er ikke ansvarlig for prøveudtagningen. OBS: Laboratoriesvar fremsendes pr. e-mail				
Jeg accepterer Center for Diagnostik DTU's generelle forretningsbetingelser: https://dtu.dk/om-dtu/kontakt-og-besog/for-leverandorer/samhandel-med-dtu				

Version: Oktober 2023

Bilag 2

Udtagning af svaberprøver for COVID-19 hos mink

Husk handsker og mundbind, så du ikke selv forurener prøverne.

Læg prøvematerialet frem på et rent underlag. Vatpinden må ikke pakkes helt ud – den må ikke røre underlaget.

**Udtagelse af svælgsvaber**

Vatpinden føres ned i svælg bagest i mundhulen, hvor den rulles mod slimhinden hele vejen rundt i svælg.

Vær omhyggelig med at svaberen ikke rører ved andet.



Knæk vatpinden/nap skaftet af, så vatpinden kan være i forsendelsesrøret
Luk forsendelsesrøret og læg prøverne i en lille plasticpose.



Husk at udfylde, underskrive og medsende rekvisitionsblanket sammen med prøverne.



Bilag 3

CENTER FOR DIAGNOSTIK

Henrik Dams Allé

Bygning 205

2800 Kgs. Lyngby

Til forskning/diagnostik

**BIOLOGISK STOF,
KATEGORI B**

Animalsk materiale til patologisk undersøgelse: let fordærveligt; skrøbeligt indhold; må ikke åbnes udenfor bestemmelseslaboratoriet.

Tlf. nr. til pakkemodtagelse: 9351 0763



CENTER FOR DIAGNOSTIK

Henrik Dams Allé

Bygning 205

2800 Kgs. Lyngby

Til forskning/diagnostik

**BIOLOGISK STOF,
KATEGORI B**

Animalsk materiale til patologisk undersøgelse: let fordærveligt; skrøbeligt indhold; må ikke åbnes udenfor bestemmelseslaboratoriet.

Tlf. nr. til pakkemodtagelse: 9351 0763



Bilag 4

STATENS SERUM INSTITUT

Veterinær Diagnostik
PDC, bygning 85, stuen th
Artillerivej 5
2300 København S



**BIOLOGISK STOF,
KATEGORI B**

- AI, døde vilde fugle (svabere fra FVST)
- Bakteriologi, parasitologi, mykologi
- MRSA overvågning (211/101)
- Serologi (blodprøver)
- Skylleprøver fra tyre (ikke køl)
- Tuberkulose
- Virologi (AI, ND, ILT)
- Virologi (svineinfluenza, PRRS PCR)
- Virologi (øvrige virus)

- BSL2
- BSL3

Animalsk materiale til patologisk undersøgelse: let fordærveligt; skrøbeligt indhold; må ikke åbnes udenfor bestemmelseslaboratoriet.

STATENS SERUM INSTITUT

Veterinær Diagnostik
PDC, bygning 85, stuen th
Artillerivej 5
2300 København S



**BIOLOGISK STOF,
KATEGORI B**

- AI, døde vilde fugle (svabere fra FVST)
- Bakteriologi, parasitologi, mykologi
- MRSA overvågning (211/101)
- Serologi (blodprøver)
- Skylleprøver fra tyre (ikke køl)
- Tuberkulose
- Virologi (AI, ND, ILT)
- Virologi (svineinfluenza, PRRS PCR)
- Virologi (øvrige virus)

- BSL2
- BSL3

Animalsk materiale til patologisk undersøgelse: let fordærveligt; skrøbeligt indhold; må ikke åbnes udenfor bestemmelseslaboratoriet.

Bilag 5



Center for Diagnostik DTU

OBS: Mærk forsendelsen "Til forskning/diagnosticering"

Mink svaberprøver til test for SARS-CoV-2 ved PCR

Indsender:	Ejer:			
	CHR-nr.:			
	E-mail:			
	Mobil tf.:			
Besætningsadresse:	Praksisnr.:		Dyreart:	Mink
	Autorisationsnr.:		Antal dyr:	
	Udtagelsesdato:		Alder:	-
	Besætningstype/status:		Materiale:	Svaber
Prøvemateriale afsendes fra:	<input type="checkbox"/> Besætningsadresse <input type="checkbox"/> Dyrlæge/praksis <input type="checkbox"/> Anden adresse:			
Indsendelsesårsag:	<input type="checkbox"/> Kvartalsvis overvågning <input type="checkbox"/> Før-plesnings-prøver <input type="checkbox"/> Indførselsprøver			
Mærke (ved flere end 20 prøver kan flere blanketter benyttes)				
1				11
2				12
3				13
4				14
5				15
6				16
7				17
8				18
9				19
10				20
Særlige bemærkninger:				
Navn (blokbogstaver) og underskrift:				
Laboratoriet er ikke ansvarlig for prøveudtagningen. OBS: Laboratoriesvar fremsendes pr. e-mail				
Jeg accepterer Center for Diagnostik DTU's generelle forretningsbetingelser: https://dtu.dk/om-dtu/kontakt-og-besoger/for-leverandorer/samhandel-med-dtu				

Version: Oktober 2023

Bilag 6



Læs hvordan SSI behandler personoplysninger her [Persondatapolitik](#), under "Hvis SSI analyserer en prøve fra din besætning".

Rekviritionsblanketten udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver. Blanketten kan hentes her: www.vetssi.dk/blanket

Prøvemateriale indsendes til (tlf. 3268 8600): Veterinær Diagnostik, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, Att.: PDC, bygn. 85
 Kadavere og hele organer indsendes til: Sektion for Patobiologi, Sektionsstuen, Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Ridebanevej 3, 1870 Frederiksberg C, tlf. 9350 9280 mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.00-15.00

Indsender (stempel):	Svar sendes til e-mail adresse(r):
	Mobiltelefon:
	Praksisnr.:
	Autorisationsnummer:

Besætningsadresse:	CHR-nr.:	Ejer:
	Besætningstype /status:	Antal dyr:
	Udtagelsesdato:	Materiale: <input type="checkbox"/> Kadaver/organer (sendes til KU)
	Dyreart:	<input type="checkbox"/> Blod <input type="checkbox"/> Fæces <input type="checkbox"/> Væv type: _____
		<input type="checkbox"/> Serum <input type="checkbox"/> Andet: _____

Undersøgelses anledning og andre bemærkninger:

Mistanke om anmeldeligt sygdom FVST er underrettet om indsendelse Overvågning Specificeret diagnostik Eksport
 Andet: _____

Kliniske oplysninger: Abort Diarré Hudlidelse Luftvejslidelse CNS-symptomer Dødsfald Ledlidelse Reproduktionsproblemer
 Andet: _____

Analysér	Prøvenr.:	Analysér	Prøvenr.:
<input type="checkbox"/> Abekopper (monkeypox) PCR (9388)		<input type="checkbox"/> Mykobakterier standardundersøgelse mikroskopi og dyrkning (9100)	
<input type="checkbox"/> Afrikansk hestepest antistof (9167)		<input type="checkbox"/> Rabbit hæmorrhagic disease virus (RHDV, VHDV) PCR (9079)	
<input type="checkbox"/> Afrikansk hestepest PCR (9129)		<input type="checkbox"/> Rabies PCR (9163, 9164)	
<input type="checkbox"/> Aleutian mink disease virus (ADV) mink plasmacytosevirus PCR (9120)		<input type="checkbox"/> Salmonellose, Salmonella dyrkning (9080)	
<input type="checkbox"/> Bakteriologisk undersøgelse dyrkning (9327)		<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 antistof (9330)	
<input type="checkbox"/> Canine distemper virus (hvalpesyge, mink) PCR (9114)		<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 PCR (9314, 9408)	
<input type="checkbox"/> Ebola (EVD) PCR (9418)		<input type="checkbox"/> Snive (Burkholderia mallei) PCR (9247)	
<input type="checkbox"/> Ekinokokundersøgelse (9072)		<input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii antistof (9354)	
<input type="checkbox"/> Histopatologisk undersøgelse (9282)		<input type="checkbox"/> Trikinundersøgelse (9071)	
<input type="checkbox"/> Influenza A virus (IAV) PCR (9105)		<input type="checkbox"/> Tularemi (harepest) dyrkning/PCR (9095)	
<input type="checkbox"/> Influenza A virus (IAV) subtypning, pandemisk Influenza A virus (H1pdm09) (9106)		<input type="checkbox"/> Usutuvirus (USUV) PCR (9155)	
<input type="checkbox"/> Influenza A virus (IAV) subtype sekvensanalyse (9103)		<input type="checkbox"/> Vesikulær stomatitis (VSV) antistof (9183)	
<input type="checkbox"/> Leptospira antistof (9040-9056) Angiv ønsket type: _____		<input type="checkbox"/> Vesikulær stomatitis (VSV) PCR (9148, 9149)	
<input type="checkbox"/> Leptospira PCR (9070)		<input type="checkbox"/> West Nile virus (WNV) antistof (9189)	
<input type="checkbox"/> Andet: _____		<input type="checkbox"/> West Nile virus (WNV) PCR (9154, 9156)	

Prøvenr. - se næste side

Dato:	Navn (blokbogstaver):
Underskrift (Jeg har læst og accepterer SSI's salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende for bestillingen):	

Forbeholdt laboratoriet

Modtaget dato:	Modtaget af:	Bemærkninger og sagsnummer:
----------------	--------------	-----------------------------



Prøveoplysninger					
Nr.	Prøvenr.:	Nr.	Prøvenr.:	Nr.	Prøvenr.:
1		31		61	
2		32		62	
3		33		63	
4		34		64	
5		35		65	
6		36		66	
7		37		67	
8		38		68	
9		39		69	
10		40		70	
11		41		71	
12		42		72	
13		43		73	
14		44		74	
15		45		75	
16		46		76	
17		47		77	
18		48		78	
19		49		79	
20		50		80	
21		51		81	
22		52		82	
23		53		83	
24		54		84	
25		55		85	
26		56		86	
27		57		87	
28		58		88	
29		59		89	
30		60		90	

Denne blanket skal helst printes ud med for- og bagside på samme stykke papir.
Kan dette ikke lade sig gøre skal de to sider hæftes sammen.